

Uriini kandmine vaakumkatsutitesse

SPETSIAALSE TOPSI ABIL

- 1** Eemaldage osaliselt topsi kaanelt kaitsekleebis



- 2** Suruge uriinikatsuti uriinitopsi kaanes oleva avause põhja




- 3** Hoidke katsutit kuni uriinivool katsutisse lakkab ja eemaldage katsuti

- 4** Keerake katsuti(te) põhi rahuliku liigutusega 8-10 korda ülespidi ja tagasi, et katsutis olev säilitusaine lahustuks




- 5** Markeerige katsutid

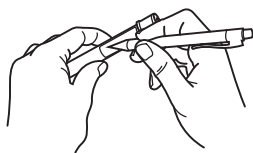

- 6** Valage ülejäänud uriin proovitopsist WC potti. Sulgege proovitops kaanega ja kaanel olev avaus uuesti kleebisega



- 7** Hävitage tops vastavalt oma asutuse jäätmekäitluskorrale

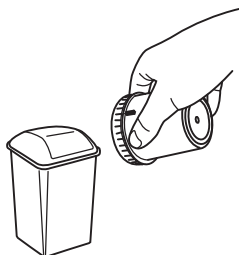

KÖRRE ABIL

- 1** Avage proovitops ja asetage spetsiaalne kõrs peene otsaga proovitopsi




- 2** Suruge uriinikatsuti kõrre laia otsa põhja




- 3** Hoidke katsutit kuni uriinivool katsutisse lakkab ja eemaldage katsuti

- 4** Keerake katsuti(te) põhi rahuliku liigutusega 8-10 korda ülespidi ja tagasi, et katsutis olev säilitusaine lahustuks

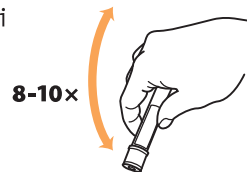

- 5** Markeerige katsutid

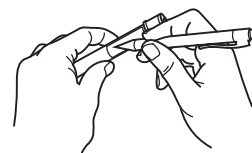

- 6** Valage ülejäänud uriin proovitopsist WC potti



- 7** Hävitage tops ja kõrs vastavalt oma asutuse jäätmekäitluskorrale

