

## Использование иглодержателя Vacuette Quickshield Safety

**1**

Вкрутите иглу в иглодержатель

**2**

Снимите колпачок с иглы

**3**

Произведите пункцию вены

**4**

Вставьте пробирку в иглодержатель

**5**

Извлеките наполненную пробирку из иглодержателя

**6**

Надавите на крышку безопасности иглы, чтобы активировать механизм закрытия

**7**

Щелчок свидетельствует о том, что механизм сработал правильно

**8**

Выбросьте весь комплект для забора крови в контейнер для утилизации игл



**QUATTROMED HTI KLIENDITUGI**

Tel: 17123

E-post: klienditugi@quattromed.ee

[www.quattromed.ee](http://www.quattromed.ee)