







Kapillaarvere võtmise vahendid

Mikrokatsutid		
<ul style="list-style-type: none"> • Erinevate analüüside jaoks võtta veri erinevate lisanditega mikrokatsutitesse • Tühje mikrokatsuteid säilitada +4...+25 oC juures. • Jälgida mikrokatsutite aegumistähtaegu. Aegunud katsuteid mitte kasutada. 		
Katsuti	Korgi värv	Kasutusala
	Punane või roosa: EDTA-lisandiga	Hemogramm
	Lilla	ESR määramine
	Pruun või valge	Biokeemia, immunoloogia, seroloogia
	Kollane	Glükoosi määramine
Lantsetid		
<ul style="list-style-type: none"> • Lantseti valikul arvestada patsiendi vanust ja seda, kui palju on proovimaterjali vaja. Mida korralikum on nahatorge, seda kvaliteetsemat proovimaterjali saab. Lastel kasutada väiksemaid lantsette, et mitte vigastada luud. 		
	Roosa	Väiksema koguse vere võtmisel
	Sinine	Suurema koguse vere võtmisel