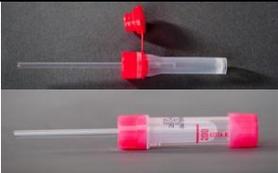


Необходимое оснащение для взятия капиллярной крови

Микропробирки		
<ul style="list-style-type: none"> • Для разных исследований кровь надо брать в микропробирки с разными добавлениями • Пустые микропробирки следует хранить при температуре +4...+25°. • Необходимо контролировать срок использования микропробирок. Не допускается использование микропробирок с истекшим сроком годности. 		
Пробирки	Цвет пробки	Область применения
	С красной или розовой крышкой: с добавлением EDTA	Гемограмма
	С лиловой крышкой	Определение ESR
	С коричневой или белой крышкой	Биохимия, иммунология, серология
	С жёлтой пробкой	Определение глюкозы
Ланцет		
<ul style="list-style-type: none"> • При выборе ланцета следует учитывать возраст пациента и необходимое количество исследуемого материала. Чем более корректно проведен прокол кожи, тем более качественный материал для исследования можно получить. У детей следует использовать ланцеты с меньшей глубиной проникновения, чтобы не повредить кости ребенка. 		
	Розовый	Для сбора маленького количества крови.
	Синий	Для сбора большого количества крови