

Необходимое оснащение для взятия венозной крови

Вакуумные пробирки

- Для разных исследований кровь берется в разные вакуумные пробирки с предусмотренными добавками, **следуя правильной очередности пробирок (таблица 1)**.
- Пустые вакуумные пробирки хранятся в штативе в вертикальном положении при температуре +4...+25°C
- Необходим контроль срока годности пробирок. Просроченные пробирки использовать нельзя.

Иглы и иглодержатели

- Исходя от директивы EU 2010/32/EL нужно использовать иглы и иглодержатели оснащенные безопасной системой.
- Иглы и иглодержатели предназначены для одноразового использования.
- При выборе иглы (рисунок 2) учитывается возраст пациента и диаметр пунктируемой вены: слишком толстая игла повреждает стенку сосуда, а при использовании излишне тонкой иглы поток крови медленный, что может способствовать гемолизу.
- Для детей следует использовать тонкие иглы: 22G (с черным наконечником) для взрослых более толстые: 20G (с желтым наконечником) и 21G (с зеленым наконечником).
- Иглу вкручивают в иглодержатель той стороной, на которой находится латексное покрытие (часть иглы с серым пластмассовым наконечником).
- Латексное покрытие закрывает иглу, а тем самым и поток крови во время смены пробирок.



Зелёная 21G



Чёрная 22G



Одноразовый иглодержатель