

VEENIVERE VÕTMISE VAHENDID

Vaakumkatsutid

- Erinevate analüüside jaoks võtta veri erinevate lisanditega vaakumkatsutitesse, **järgides katsutite õiget järjekorda (Tabel 1)**
- Tühje vaakumkatsuteid säilitada +4...+25 oC juures statiivil püstises asendis.
- Jälgida katsutite aegumistähtaegu. Aegunud katsuteid mitte kasutada.

Nõelad ja nõelahoidjad

- Tulenevalt EU direktiivist 2010/32/EL tuleb kasutada turvasüsteemiga varustatud nõelu või nõelahoidjaid.
- Nõelad ja nõelahoidjad on ühekordseks kasutamiseks.
- Nõela valikul arvestada patsiendi vanust ja punkteeritava veeni läbimõõtu: liiga jäme nõel lõhub veeni seina, peenikese nõela kasutamisel on verevool aeglane, mis võib põhjustada hemolüüsi
- Täiskasvanutel kasutada peamiselt 21G (roheline otsaga) või 20G (kollase otsaga) nõelu, lastel peenemaid 22G (musta otsaga) nõelu.
- Nõel keeratakse nõelahoidjasse lateksiga kaetud otsaga (nõela plastikkatte hall ots).
- Latekskaitse sulgeb nõela ja sellega verevoolu katsutite vahetuse ajaks.



Roheline 21G



Must 22G



Ühekordne nõelahoidja