


## ThinPrep günekoloogilise materjali võtmine Rovers Cervex-Brush Combi seadmega

- Enne proovi võtmist pane valmis kõik vajalikud tarvikud (ThinPrep proovianum, spaatel, hari, kirjutusvahend, saatekiri).
- Kontrolli ThinPrep proovianuma realiseerimiskuupäeva. Ära kasuta aegunud proovinõud.
- Eemalda ThinPrep proovianumalt plastikust kate.
- Märki ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood ja kuupäev. Saatekirjale märki patsiendi nimi, isikukood, kuupäev ning anamnees. NB! Puuduvate andmete korral on laboril õigus proov tagasi saata.
- Enne proovi võtmist eemalda ThinPrep proovianumalt kork.
- Võimalusel tuleks vältida libestite/lubrikantide kasutamist speekulumi niisutamiseks. Kui see on vältimatu, siis kasutada vee-põhist karbomeeri-vaba lubrikanti ainult välimisel speekulumi küljel. Lubrikandi sattumine speekulumi tipmisele osale ja seeläbi jõudmine ThinPrep proovianumasse, võib oluliselt segada analüüsi adekvaatsust. Selle asendamiseks võib kasutada vähest sooja vett.



1. Kirjuta ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood ning kuupäev, millal proov on võetud. Saatekirjale märkida patsiendi nimi, isikukood, kuupäev ning anamnees.

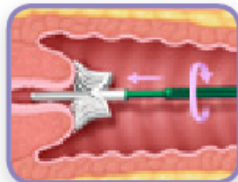

2. Materjali võtmine tsütoharjaga Cervex-Brush Combi: harja tipmine pikendus sisestada kaelakanalisse (endotservikaali) nii sügavale, et harja lühemad külgmised harjased oleksid tihedalt ektotservikaalis. Õrnalt keerata harja kellaosuti suunas 2 täispööret (2 x 360°).



3. Koheselt loputada tsütoharja vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas. Loputada tuleks jõuliselt 10 korda nii, et harjased läheksid anuma põhjas paindesse. Lõpetuseks segada harja ringjate liigutustega vedelikus ning seejärel hari utiliseerida. Mitte jätta tsütoharja pead proovianumasse!



4. Sulge tugevalt ThinPrep proovianum korgiga. Keera korki kellaosuti suunas nii, et korgil olev märgistatud triip mööduks proovianumal olevast märgitud triibust. Mitte üle keerata!



5. ThinPrep proovianum koos saatekirjaga transportida laborisse.