


## ThinPrep günekoloogilise materjali võtmine Rovers Cervex-Brush seadmega

- Enne proovi võtmist pane valmis kõik vajalikud tarvikud (ThinPrep proovianum, spaatel, hari, kirjutusvahend, saatekiri).
- Kontrolli ThinPrep proovianuma realiseerimiskuupäeva. Ära kasuta aegunud proovinõud.
- Eemalda ThinPrep proovianumalt plastikust kate.
- Märki ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood ja kuupäev. Saatekirjale märki patsiendi nimi, isikukood, kuupäev ning anamnees. NB! Puuduvate andmete korral on laboril õigus proov tagasi saata.
- Enne proovi võtmist eemalda ThinPrep proovianumalt kork.
- Võimalusel tuleks vältida libestite/lubrikantide kasutamist spekulumi niisutamiseks. Kui see on vältimatu, siis kasutada veepõhist karbomeerivaba lubrikanti ainult välimisel spekulumi küljel. Lubrikandi sattumine spekulumi tipmisele osale ja seeläbi jõudmine ThinPrep proovianumasse, võib oluliselt segada analüüsi adekvaatsust. Selle asendamiseks võib kasutada vähest sooja vett.



1. Kirjuta ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood ning kuupäev, millal proov on võetud. Saatekirjale märkida patsiendi nimi, isikukood, kuupäev ning anamnees.

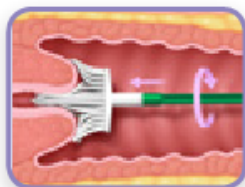

2. Materjali võtmine tsütoharjaga Cervex-Brush: harja tipmised pikemad harjased sisestada kaelekanalisse (endotservikaali) nii sügavale, et harja lühemad külgmised harjased oleksid tihedalt ektotservikaalis. Õrnalt keerata harja kellaosuti suunas 5 täispööret (5 x 360°).



3. Koheselt loputada tsütoharja vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas. Loputada tuleks jõuliselt 10 korda nii, et harjased läheksid anuma põhjas paindesse. Lõpetuseks segada harja ringjate liigutustega vedelikus ning seejärel hari utiliseerida. Mitte jätta tsütoharja pead proovianumasse!



4. Sulge tugevalt ThinPrep proovianum korgiga. Keera korki kellaosuti suunas nii, et korgil olev märgistatud triip mööduks proovianumal olevast märgitud triibust. Mitte üle keerata!



5. ThinPrep proovianum koos saatekirjaga transportida laborisse.