


ThinPrep günekoloogilise materjali võtmine spaatli (Pap-Perfect Spatula) ja endotservikaalse harjaga (Medscand Cytobrush)

- Enne proovi võtmist pane valmis kõik vajalikud tarvikud (ThinPrep proovianum, spaatel, hari, kirjutusvahend, saatekiri).
- Kontrolli ThinPrep proovianuma realiseerimiskuupäeva. Ära kasuta aegunud proovinõud.
- Eemalda ThinPrep proovianumalt plastikust kate.
- Märki ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood ja kuupäev. Saatekirjale märki patsiendi nimi, isikukood, kuupäev ning anamnees. NB! Puuduvate andmete korral on laboril õigus proov tagasi saata.
- Enne proovi võtmist eemalda ThinPrep proovianumalt kork.
- Võimalusel tuleks vältida libestite/lubrikantide kasutamist speekulumi niisutamiseks. Kui see on vältimatu, siis kasutada veepõhist karbomeerivaba lubrikanti ainult speekulumi välimisel küljel. Lubrikandi sattumine speekulumi tipmisele osale ja seeläbi jõudmine ThinPrep proovianumasse võib oluliselt mõjutada analüüsi adekvaatsust. Selle asendamiseks sobib vähese sooja vee kasutamine.




1. Kirjuta ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood ja kuupäev, millal proov on võetud. Saatekirjale märkida patsiendi nimi, isikukood ning anamnees.

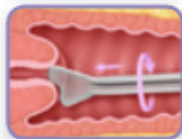

2. Materjali võtmine ektotservikaalset spaatliga: spaatlit keerata õrnalt 1 täispööre (360°) kellaosuti suunas.



3. Koheselt loputada spaatlit vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas. Loputada tuleks jõuliselt 10 korda ning seejärel spaatel utiliseerida.

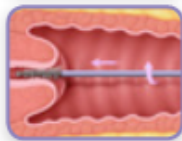

4. Materjali võtmine kaelakanalist (endotservikaalset) harjaga: hari sisestada emakakaelakanalisse nii sügavale, et harja ülemised harjased oleksid silmale veel nähtaval. Õrnalt keerata harja kellaosuti suunas 1/4 või 1/2 pööret. Mitte üle keerata!



5. Koheselt loputada endotservikaalset harja vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas. Loputada tuleks jõuliselt 10 korda, surudes harja vastu proovianuma seina. Lõpetuseks segada harja ringjate liigutustega vedelikus ning seejärel hari utiliseerida.



6. Sulge tugevalt ThinPrep proovianum korgiga. Keera korki kellaosuti suunas nii, et korgil olev märgistatud triip mööduks proovianumal olevast märgitud triibust. Mitte üle keerata!



7. ThinPrep proovianum koos saatekirjaga transportida laborisse.