




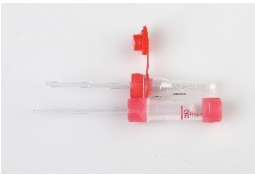


KAPILLAARVERE VÕTMISE VAHENDID

MIKROKATSUTID		
<ul style="list-style-type: none"> • Erinevate analüüside jaoks võtta veri erinevate lisanditega mikrokatsutitesse • Tühje mikrokatsuteid säilitada +4...+25°C juures. • Jälgida mikrokatsutite säilivustähtaegu. Aegunud katsuteid mitte kasutada. 		
KATSUTI	KORGI VÄRV	KASUTUSALA
	Punane või roosa, EDTA-lisandiga	<ul style="list-style-type: none"> • Hemogramm
	Lilla	<ul style="list-style-type: none"> • ESR
	Pruun või valge	<ul style="list-style-type: none"> • Biokeemia • Immunoloogia • Seroloogia
	Kollane	<ul style="list-style-type: none"> • Glükoos
LANTSETID		
<p>Lantseti valikul arvestada patsiendi vanust ja seda, kui palju on proovimaterjali vaja. Mida korralikum on nahatorge, seda kvaliteetsema proovimaterjali saab. Lastel kasutada väiksemaid lantsette, et mitte vigastada luud.</p>		
	Roosa	<ul style="list-style-type: none"> • 1,8mm
	Sinine	<ul style="list-style-type: none"> • 2,0mm