


Инструкция по взятию мазка из носоглотки в новую пробирку с универсальной транспортной средой (UTM) для определения COVID-19

Пробирка с универсальной транспортной средой (UTM) с двумя FLOQ тампонами-щётками позволяет собрать больше биологического материала для определения возбудителей заболеваний верхних дыхательных путей, что повышает чувствительность анализа.

В целях безопасности во время взятия пробы используйте защитный халат, резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

Взятие пробы:

1. Объясните пациенту процедуру взятия пробы.
2. В случае насморка пациент перед взятием пробы должен высморкаться.
3. Мазок из носоглотки лучше всего брать, когда пациент сидит, слегка запрокинув голову.
4. Промаркируйте пробирку штрих-кодом, а также обязательно разборчиво печатными буквами подпишите **имя, фамилию и личный код пациента**.
5. Продезинфицируйте руки и наденьте чистые перчатки.
6. Откройте упаковку с тампонами. В комплекте 2 FLOQ тампона-щётки, по одному для каждого носового прохода.
7. Возьмите один тампон и введите его по ходу носового прохода в нижнюю часть носоглотки. Взрослым - на глубину примерно 5-7 см, детям до середины расстояния между носом и ухом.
8. Проверните тампон 5 раз, прижимая ее к слизистой носоглотки, и удерживайте на месте в течение 5 секунд для лучшего пропитывания материалом. Затем осторожно извлеките тампон из носа.

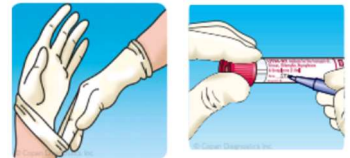

9. Держите пробирку вдали от своего лица. Откройте пробирку с универсальной транспортной средой UTM и **держите ее в вертикальном положении, чтобы жидкость не вытекала!**
10. Осторожно поместите тампон с материалом в транспортную среду UTM до упора.
11. Слегка сгибая, отломите ручку аппликатора в обозначенной точке перелома.
12. Возьмите второй тампон и повторите процедуру с 7 по 11 пункты.
13. Плотно закрутите крышку пробирки, это исключит вытекание жидкости. **Пробирка с материалом для исследования не должна протекать! Протекающую пробирку лаборатория не примет.**



14. Поместите пробирку с универсальной транспортной средой в индивидуальный пластиковый пакет с застежкой (minigrip). Для транспортировки упакуйте уже собранные пробирки в пакетах minigrip в отдельный большой minigrip пакет. **Пометьте его маркировкой COVID-19.**
15. Материал в пробирке с универсальной транспортной средой UTM хранится при температуре 2–8 °C максимум 48 часов.

NB! Избегайте контаминации внешней поверхности пакета. Не прикасайтесь к нему теми же перчатками, в которых проводился забор пробы. После забора пробы выбросьте одноразовые защитные средства и продезинфицируйте руки.