


ThinPrep günekoloogilise materjali võtmine spaatli ja endotservikaalse harjaga

- Enne proovi võtmist pane valmis vajalikud tarvikud: ThinPrep proovianum, spaatel, hari, kirjutusvahend ja saatekiri.
- Kontrolli ThinPrep proovianuma realiseerimiskuupäeva. Aegunud proovinõud ei tohi kasutada.
- Võimalusel tuleks vältida spekulumi niisutamiseks libestite/lubrikantide kasutamist, sest lubrikandi sattumine spekulumi tipmisele osale ja seeläbi jõudmine ThinPrep proovianumasse võib oluliselt mõjutada analüüsi adekvaatsust. Kui see on vältimatu, siis kasutage veepõhist karbomeerivaba lubrikanti või vähest sooja vett ainult spekulumi välimisel küljel.




1. Eemalda ThinPrep proovianumalt plastikust kate. Kirjuta ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood või sünniaeg ja proovivõtmise kuupäev. Saatekirjale märgi patsiendi nimi, isikukood ning anamnees. NB! Puuduvate andmete korral on laboril õigus proov tagasi saata.

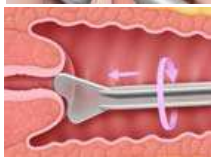

2. Materjali võtmiseks ektotservikaalist keera plastikust spaatlit 1 täispööre (360°) kellaosuti suunas.



3. Loputa spaatlit koheselt vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas seda jõuliselt 10 korda keerutades ning seejärel utiliseeri spaatel.

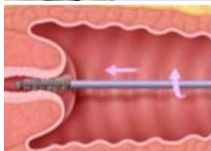

4. Materjali võtmiseks endotservikaalist vii hari emakakaelakanalisse nii sügavale, et harja alumised harjased oleksid silmale veel nähtavad. Keera harja õrnalt kellaosuti suunas ¼ või ½ pööret. Väldi ülekeeramist.



5. Loputa endotservikaalset harja koheselt vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas. Keerutada tuleks jõuliselt 10 korda, surudes harja vastu proovianuma seina. Lõpetuseks sega harja ringjate liigutustega vedelikus ning seejärel utiliseeri hari.



6. Sulge ThinPrep proovianum tugevalt korgiga. Keera korki kellaosuti suunas nii, et korgil olev märgistatud triip mööduks proovianumal olevast märgitud triibust. Väldi ülekeeramist.



7. Säilita ThinPrep proovianum toatemperatuuril ning saada koos saatekirjaga laborisse.