


ThinPrep günekoloogilise materjali võtmine Rovers Cervex-Brush Combi harjaga

- Enne proovi võtmist pane valmis vajalikud tarvikud: ThinPrep proovianum, hari, kirjutusvahend ja saatekiri.
- Kontrolli ThinPrep proovianuma realiseerimiskuupäeva. Aegunud proovinõud ei tohi kasutada.
- Võimalusel tuleks vältida spekulumi niisutamiseks libestite/lubrikantide kasutamist, sest lubrikandi sattumine spekulumi tipmisele osale ja seeläbi jõudmine ThinPrep proovianumasse võib oluliselt mõjutada analüüsi adekvaatsust. Kui see on vältimatu, siis kasutage veepõhist karbomeerivaba lubrikanti või vähest sooja vett ainult spekulumi välimisel küljel.



1. Eemalda ThinPrep proovianumalt plastikust kate. Kirjuta ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood või sünniaeg ja proovivõtmise kuupäev. Saatekirjale märgi patsiendi nimi, isikukood ning anamnees. NB! Puuduvate andmete korral on laboril õigus proov tagasi saata.

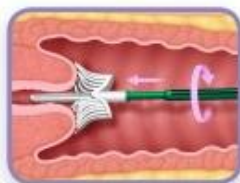

2. Materjali kogumiseks sisestada harja keskmine, pikem osa endotservikaalsesse kanalisse nii sügavale, et harja äärmised, lühemad harjased puutuvad vastu ektotserviksit. Õrnalt lükates keerata harja kellaostuti suunas 2 täispööret.



3. Loputa harja koheselt vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas vajutades jõuliselt 10 korda harja vastu proovianuma põhja surudes harjaseid laiali. Lõpetuseks sega harja ringjate liigutustega vedelikus ning seejärel utiliseeri hari.



4. Sulge ThinPrep proovianum tugevalt korgiga. Keera korki kellaostuti suunas kuni korgil olev must märgistustriip mööduks proovianumal olevast märgitud triibust. Väldi ülekeeramist.



5. Säilita ThinPrep proovianum toatemperatuuril ning saada koos saatekirjaga laborisse.