

ROE, ANAALKAABE



CARY-BLAIR VEDELA TRANSPORDI-
SÖÖTMEGA KATSUTI

Külv: *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*
DNA/RNA uuringud (PCR jm NAAT meetodid):
Soolebakterite DNA paneel, Sooleviiruste RNA/DNA
paneel, Sooleparasiitide DNA paneel, *Helicobacter*
pylori DNA ja klaritromütsiini tundlikkuse paneel

MATERJAL: ROE*

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 48 h



STERIILNE TAMPOONIGA KATSUTI

Mikroskoopia: *Enterobius vermicularis* (naaskelsaba)

MATERJAL: ANAALKAABE

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 24 h



10%
FORMALIINIGA
ROOJATOPS

Parasiitide mikroskoopia: ussnugiliste munad ja
algloomade tsüstid, ussi osa

MATERJAL: ROE, USSI OSAD

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C või
toatemperatuuril 7 päeva



ROOJATOPS

Antigeeni uuringud: *C. difficile* toksiin, *H. pylori*

MATERJAL: ROE

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 72 h

* REKTAALKAABET võib kasutada ainult külvi ja DNA/RNA uuringuteks juhul, kui rooja proovi ei saa koguda. Rektaalkaapest tehtud uuring on võrreldes rooja uuringuga oluliselt madalama tundlikkusega.