



Turvaliste verevõtuvahendite kasutamine


1 Keerake nõel hoidjasse

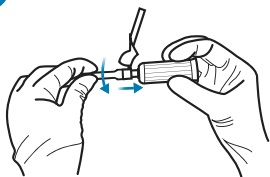


2 Eemaldage nõelalt kork

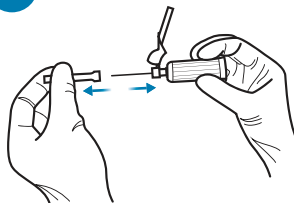


3 Teostage veenipunktsioon

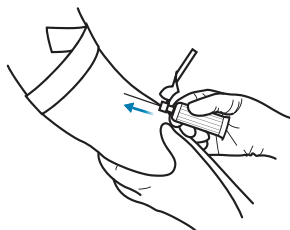


4 Ühendage katsuti nõelaga

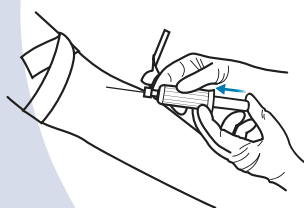

5 Eemaldage täitunud katsuti nõelahoidjast

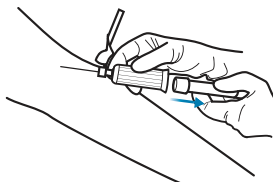

6 Lükake pöidlaga nõelale turvakate

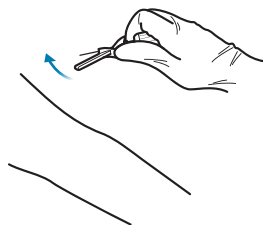

7 Kuuldav „klõps“ kinnitab turvamehhanismi sulgemist




8 Visake kogu verevõtu komplekt jäätmekonteinerisse




Использование безопасных инструментов для забора крови


1 Вкрутите иглу в иглодержатель

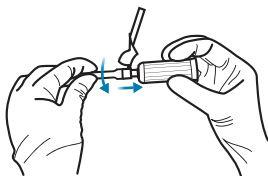


2 Снимите колпачок с иглы

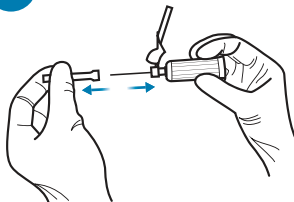


3 Произведите пункцию вены

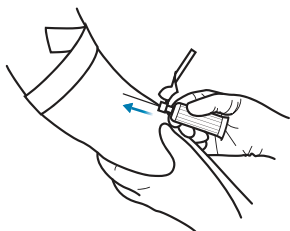


4 Вставьте пробирку в иглодержатель

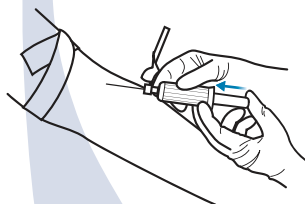

5 Извлеките наполненную пробирку из иглодержателя

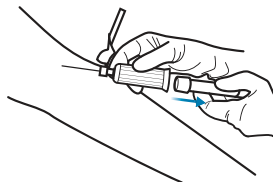

6 Надвиньте пальцем на иглу защитный колпачёк

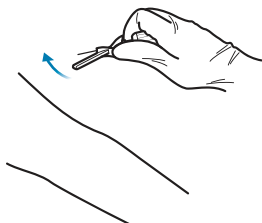

7 Щелчок свидетельствует о том, что механизм сработал правильно



8 Выбросьте весь комплект для забора крови в контейнер для утилизации игл

