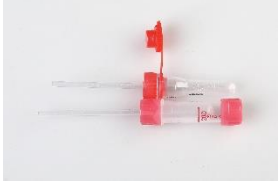




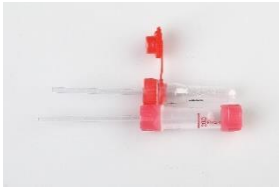






<b>MIKROKATSUTID</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erinevate analüüside jaoks võtta veri erinevate lisanditega mikrokatsutitesse.</li> <li>• Tühje mikrokatsuteid säilitada +4...+25°C juures.</li> <li>• Jälgida mikrokatsute säilivustähtaegu. Aegunud katsuteid mitte kasutada.</li> </ul>			
<b>KATSUTI</b>	<b>KORGI VÄRV</b>	<b>KASUTUSALA</b>	<b>KOGUS</b>
	Punane või roosa, EDTA-lisandiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemogramm</li> </ul>	Pool katsuti, 0,5 mL
	Lilla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ESR</li> </ul>	Üks täis katsuti
	Pruun või valge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biokeemia</li> <li>• Immunoloogia</li> <li>• Seroloogia</li> </ul>	Vitamiinide jaoks võtta igale vitamiinile eraldi täis katsuti.
	Kollane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Glükoos</li> </ul>	Pool katsuti, 0,5 mL
<b>LANTSETID</b>			
	Sinine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0 mm</li> </ul>	

<b>МИКРОПРОБИРКИ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для разных исследований кровь надо брать в микропробирки с разными добавлениями.</li> <li>• Пустые микропробирки следует хранить при температуре +4...+25°.</li> </ul> <p>Необходимо контролировать срок использования микропробирок. Не допускается использование микропробирок с истекшим сроком годности.</p>			
<b>Пробирки</b>	<b>Цвет пробки</b>	<b>Область применения</b>	
	С красной или розовой крышкой, с добавлением EDTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гемограмма</li> </ul>	Pool katsutit, 0,5 mL
	С лиловой крышкой	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение ESR</li> </ul>	Üks täis katsuti
	С коричневой или белой крышкой	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Биохимия</li> <li>• Иммунология</li> <li>• Серология</li> </ul>	Vitamiinide jaoks võtta igale vitamiinile eraldi täis katsuti.
	С жёлтой пробкой	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Определение глюкозы</li> </ul>	Pool katsutit, 0,5 mL
<b>ЛАНЦЕТЫ</b>			
	Синий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0 mm</li> </ul>	