


Suu limaskesta kaape võtmise juhend

Võtke DNA proov vähemalt 1 tund pärast söömist, joomist või hammaste pesu.

Enne proovi võtmist soovitame suud loputada veega.

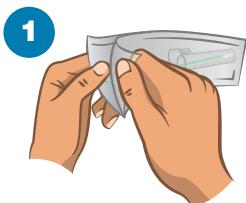


Avage pakend selleks ettenähtud kohast.



Võtke tampoon katsutist välja.

Ärge katsuge tamponi vatist otsa näpuga!

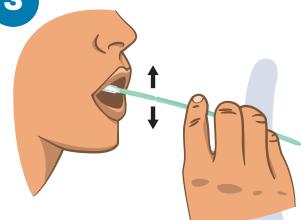

DNA proovi võtmiseks hõõruge tamponi tugevalt ca 1 minut vastu põse limaskesta. Ärge hõõruge limaskesta liiga suurt ala, keskenduge ühele konkreetsele piirkonnale.



Asetage tampoon tagasi katsutisse.

Ärge katsuge tamponi vatist otsa näpuga!



Murdke tamponi vars selleks ettenähtud kohast (vagu tamponi varrel). Tamponi vatist osa peab jäma katsutisse.



Kui Te ei saa kogutud DNA proovi koheselt labrisse saatma, võib katsutit säilitada külmkapis temperatuuril 2-8° C kuni 3 päeva.

Sulgege katsuti, markeerige ning saatke laborisse.

Руководство по взятию мазка из полости рта


Пробу ДНК следует брать не раньше чем через 1 час после еды, питья или чистки зубов. Перед взятием пробы следует прополоскать полость рта водой.



Откройте упаковку в
указанном месте.



Достаньте тампон из пробирки.
**Не прикасайтесь к ватному
наконечнику тампона руками!**

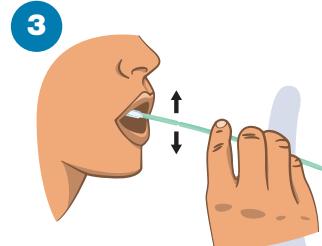

Для взятия пробы ДНК сильно потрите тампоном
слизистую щеки в течение 1 минуты. Не трите
слишком большой участок, сконцентрируйтесь на
одном конкретном участке слизистой щеки.



Поместите тампон обратно в пробирку.
**Не прикасайтесь к ватному наконечнику
тампона руками!**



Надломите палочку
тампона в указанном
для этого месте
(бороздка на палочке).
Ватный наконечник тампона
должен остаться в пробирке.



Закройте пробирку,
промаркируйте и отправьте в
лабораторию.

Если у Вас нет возможности сразу отправить
пробу в лабораторию, можете хранить её в
холодильнике при температуре 2-8° С.
Максимальный срок хранения до 3 дней.