

## Muude uriiniliikide kogumine külviks

### Kateeter uriin

- Püskateeter sulgeda sulguriga ja lasta uriin koguneda kuni 30 minutit.
- Desinfitseerida proovivõtupordi pind.
- Süstlaga või nõelaga aspireerida uriini läbi proovivõtupordi.
- Süstlast viia materjal proovitopsi ning sealt edasi vaakumkatsutisse.
- PS! Külviks ei sobi uriin kogumiskotist.

### Prostata massaažijärgne uriin

- Võtta vaakumkatsutisse keskjoa uriin.
- Teostada pärasoole kaudu eesnäärme massaaž.
- Massaaži järgselt võtta vaakumkatsutisse esmasjouriin.

### Nefrostoomi uriin

- Eemaldada vana kogumiskott.
- Puhastada stoomi ava desinfitseeriva vahendiga.
- Paigaldada avale uus kogumiskott.
- Kogumiskotti kogunenud uriin viia proovitopsi ja sealt säilitusainega vaakumkatsutisse.

### Põiepunktsiooni uriin

- Põis peab olema maksimaalselt täitunud.
- Desinfitseerida nahk punktsiooni kohalt.
- Punkteerida nõelaga põit kõhu keskjoonel, umbes 2 cm sümfüüsist kõrgemal.
- Süstlast viia proovimaterjal Amies geeltranspordisöötmesse (kummikorgiga). Sobib nii aeroobseks kui ka anaeroobseks külviks.