

MIKROBIOLOOGIA TARVIKUTE JUHEND



ROE, ANAALKAABE



CARY-BLAIR VEDELA TRANSPORDI-
SÕOTMEGA KATSUTI

Külv: *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*
DNA/RNA uuringud (PCR jm NAAT meetodid):
Soolebakterite DNA paneel, Sooleviiruste RNA/DNA
paneel, Sooleparasiitide DNA paneel, *Clostridioides*
difficile toksiin A,B DNA roojas

MATERJAL: ROE*

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 48 h



STERIILNE TAMPOONIGA KATSUTI

Mikroskoopia: *Enterobius vermicularis* (naaskelsaba)

MATERJAL: ANAALKAABE

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 24 h



10%
FORMALIINIGA
ROOJATOPS

Parasiitide mikroskoopia: ussnugiliste munad ja
algloomade tsüstid, ussi osa

MATERJAL: ROE, USSI OSAD

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C või
toatemperatuuril 7 päeva



ROOJATOPS

Antigeeni uuringud: *H. pylori*

MATERJAL: ROE

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 72 h

* REKTAALKAABET võib kasutada ainult külv ja DNA/RNA uuringuteks juhul, kui rooja proovi ei saa koguda. Rektaalkaapest tehtud uuring on võrreldes rooja uuringuga oluliselt madalama tundlikkusega.

URIIN



STERIILNE KONSERVANDIGA URIINIKATSUTI (4 ML JA 10 ML)

Külv: aeroobsed bakterid ja seened

MATERJAL: KESKJOAURIIN

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 48 h



STERIILNE LISANDITA KATSUTI (11 ML)

DNA/RNA uuringud

(PCR jm NAAT meetodid):

uretriidi ja suguhaiguste tekitajad

MATERJAL: ESMASJOAURIIN**

SÄILIVUSTINGIMUSED: Toa-temperatuuril 24 h, 2-8°C 5 päeva

Külv: mükobakterid

MATERJAL: KESKJOAURIIN

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 7 päeva


Mikroskoopia: *Schistosoma*

MATERJAL: KESKJOAURIIN

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 24 h

**** Analüüsiks on vajalik esimesed 10-20 ml uriini. Uuriini kogumisel peab olema kindel, et tuubi kogutakse ka esimesed tilgad uriini. Enam kui 20 ml esmasjoa uriini kogumine võib vähendada mikroorganismi avastamise tundlikkust.**

TAMPOONIGA VÕETAVAD MATERJALID

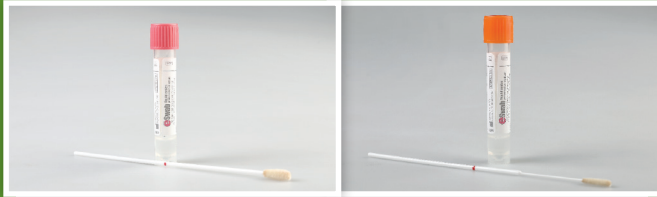


AMIES VEDELA TRANSPORDISÖÖTMEGA KATSUTI
JÄMEDA TAMPOONIGA / PEENE TAMPOONIGA

Külv: aeroobsed ja anaeroobsed bakterid, seened
DNA/RNA uuringud (PCR jm NAAT meetodid): bakterid, viirused, algloomad, seened

MATERJAL: SILMAMATERJAL, NINA- JA NINANEELUKAABE, KURGU-KAABE, KÕRVAERITIS, TUPEKAABE, EMAKAKAELAKANALIKAABE, UREETRAKAABE, NAHAKAABE, TROOFILISE HAAVANDI ERITIS, HAAVAERITIS, MÄDA, VILLISISU, VÄIKSEMAD KOETÜKID, REKTAALKAABE (vaid *N. gonorrhoeae* ja VRE uuringuks), JT

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 48 h, *Neisseria gonorrhoeae* külv 24 h

ASPIREERITAVAD, PUNKTEERITAVAD JM KEHAVEDELIKUD, KOETÜKID

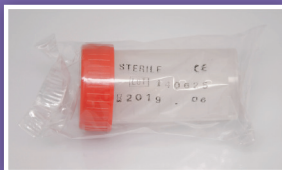

STERIILNE PROOVITOPS
Suurematele koetükkidele lisada
füsioloogiline lahus.

MATERJAL: RÖGA JM KEHAVEDELIKUD, SUUREMAD KOETÜKID

Külv: aeroobsed bakterid ja seened

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 24 h

Külv: mükobakterid

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 7 päeva

DNA/RNA uuringud (PCR jm NAAT meetodid): bakterid, viirused, algloomad

SÄILIVUSTINGIMUSED: Toatemperatuuril 24 h, 2-8°C 5 päeva

ASPIREERITAVAD, PUNKTEERITAVAD JM KEHAVEDELIKUD, KOETÜKID



AMIES GEEL-
TRANSPORDI-
SÖÖTMEGA
PROOVITOPS
(kummikork)

Külv: aeroobsed ja anaeroobsed bakterid, seened

MATERJAL: PUNKTSIOONI TEEL SÜSTLAGA VÕETAVAD
KEHAVEDELIKUD, LIIGESEVEDELIK

SÄILIVUSTINGIMUSED: 2-8°C 48 h, kaitsta valguse eest

NAHAKAABE, KÜÜNED, JUUKSED



PROOVIÜMBRIK

Külv: nahaseened

DNA/RNA uuringud (PCR jm NAAT meetodid): naha-
seente DNA paneel

Mikroskoopia: nahaseened

MATERJAL: NAHAKAABE, KÜÜNED, JUUKSED

SÄILIVUSTINGIMUSED: Toatemperatuuril 7 päeva,
2-8°C 14 päeva



**Palume markeerida iga proovinõu
ribakoodi või patsiendi andmetega.**

Proovide võtmise ja säilitustingimuste kohta saab
infot **LABORITEATMIKUST** synlab.ee

SYNLAB Eesti klienditugi

Tel: 17123 | E-post: klienditugi@synlab.ee | synlab.ee