

MIKROKATSUTID - Erinevate analüüside jaoks võtta veri erinevate lisanditega mikrokatsutitesse. - Tühje mikrokatsuteid säilitada +4...+25°C juures. - Jälgida mikrokatsutite säilivustähtaegu. Aegunud katsuteid mitte kasutada.			
KATSUTI	KORGI VÄRV	KASUTUSALA	KOGUS
	Punane või roosa, EDTA-lisandiga	Hemogramm	Pool katsutit, 0,5 mL
	Pruun või valge	- Biokeemia - Immunoloogia - Seroloogia	Vitamiinide jaoks võtta igale vitamiinile eraldi täis katsuti.
	Kollane	Glükoos	Pool katsutit, 0,5 mL
LANTSETID Lantseti valikul arvestada patsiendi vanust ja seda, kui palju on proovimaterjali vaja. Mida korralikum on nahatorge, seda kvaliteetsemat proovimaterjali saab. Lastel kasutada väiksemaid lantsette, et mitte vigastada luud.			
	Roosa	1,8 mm	
	Sinine	2,0 mm	

МИКРОПРОБИРКИ

- Для разных исследований кровь надо брать в микропробирки с разными добавлениями.
- Пустые микропробирки следует хранить при температуре +4...+25°.

Необходимо контролировать срок использования микропробирок. Не допускается использование микропробирок с истекшим сроком годности.

Пробирки	Цвет пробки	Область применения	
	С красной или розовой крышкой, с добавлением EDTA	• Гемограмма	Половина тубика, 0,5 мл
	С коричневой или белой крышкой	• Биохимия • Иммунология • Серология	Для приема витаминов используйте отдельную полную тубик каждого витамина.
	С желтой пробкой	• Определение глюкозы	Половина тубика, 0,5 мл

ЛАНЦЕТЫ

При выборе ланцета следует учитывать возраст пациента и необходимое количество исследуемого материала. Чем более корректно проведен прокол кожи, тем более качественный материал для исследования можно получить. У детей следует использовать ланцеты с меньшей глубиной проникновения, чтобы не повредить кости ребенка.

	Розовый	• 1,8 mm	
	Синий	• 2,0 mm	